

MONTAGGIO DEL KIT ASP IN ARTICOLATORE

(nell'esempio su SAM 2P)

Materiale necessario:

- Articolatore in versione avvitabile
- Kit AXIOSPLIT® per articolatore,
- Dispositivo di standardizzazione con asta
- Resina
(si consiglia: GC Pattern Resin)



1

- Rimuovere il piatto e l'asta incisale
- Rovesciare la parte superiore dell'articolatore
- Posizionare la guida diritta di Bennett a 5°
- Posizionare la guida condilare a 45°
- Aprire la centrica
- Inserire la basetta primaria Axiosplit



2

- Inserire il dispositivo di standardizzazione
- Inserire la basetta metallica inferiore
- Inserire l'asta incisale di standardizzazione
- Avvitare il disco inferiore
- Applicare tre piccole quantità di resina



3

- Riassemblare l'articolatore
- Fissare la centrica
- Tenere fino ad indurimento della resina

